

Gebrauchsanweisung

Elektrodenhandgriff für
HF Chirurgie



CE 0123



AS Medizintechnik GmbH • Sattlerstrasse 15, 78532 Tuttlingen, Germany • Tel 07461/966326 • Fax 07461/9663288

Wichtige Hinweise

- Der Elektrodenhandgriff mit dem Kabel muß vor jeder Benutzung überprüft werden.
- Elektrodenhandgriff und Kabel vor mechanischen Beschädigungen schützen
- Kabel nicht stark knicken
- Vor jedem Wasch- und Sterilisationszyklus Kabel und Elektrodenhandgriff trennen
- Nur im Autoklaven bis +134°C sterilisierbar
- Nicht in Heißluft sterilisieren
- Reinigung bis 95°C
- Die Angaben der Desinfektionsmittelhersteller müssen unbedingt eingehalten werden
- Die maximale Betriebsspannung U_{ss} beträgt 7000 Volt mit 500 kHz
- An diesem Handgriff können nur Anschluß-Kabel von AS Medizintechnik angeschlossen werden.
- Der Handgriff ist für den Einsatz folgender HF-Generatoren zugelassen: Aesculap, Berchtold, Erbe, Martin, Siemens und Valleylab.

DIE AS MEDIZINTECHNIK GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG, WENN NACHWEISLICH GEGEN DIESE KUNDEN-INFORMATION VERSTOSSEN WURDE.