

## Gebrauchsanweisung

Elektrodenhandgriff für  
HF Chirurgie



CE 0483



---

AS Medizintechnik GmbH • Sattlerstrasse 15, 78532 Tuttlingen, Germany • Tel 07461/966326 • Fax 07461/9663288

---

### Wichtige Hinweise

- Der Elektrodenhandgriff mit dem Kabel muss vor jeder Benutzung überprüft werden.
- Elektrodenhandgriff und Kabel vor mechanischen Beschädigungen schützen.
- Kabel nicht stark knicken.
- Vor jedem Wasch- und Sterilisationszyklus Kabel und Elektrodenhandgriff trennen.
- Nur im Autoklaven bis +134° C sterilisierbar.
- Nicht in Heißluft sterilisieren.
- Reinigung bis 95° C.
- Die Angaben der Desinfektionsmittelhersteller müssen unbedingt eingehalten werden.
- Die maximale Betriebsspannung  $U_{ss}$  beträgt 7000 Volt mit 500 kHz.
- An diesem Handgriff können nur Anschluß-Kabel von AS Medizintechnik angeschlossen werden.
- Der Handgriff ist für den Einsatz folgender HF-Generatoren zugelassen: Aesculap, Berchtold, Erbe, Martin, Siemens und Valleylab.

**DIE AS MEDIZINTECHNIK GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG, WENN NACHWEISLICH GEGEN DIESE KUNDEN-INFORMATION VERSTOSSEN WURDE.**