


# Gebrauchsanweisung

Zerlegbare KERRISON  
Laminektomiestanz



AS Medizintechnik GmbH • Sattlerstrasse 15, 78532 Tuttlingen, Germany • Tel 07461/966326 • Fax 07461/9663288


## DEMONTAGE

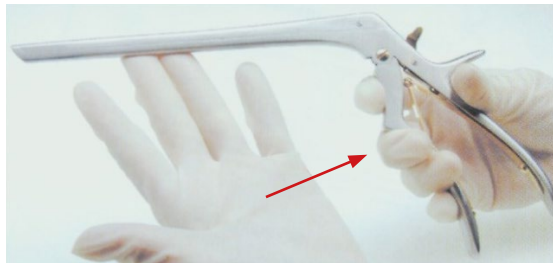


1. Zuerst den Griff schliessen.



2. Dann den Riegel nach unten drücken.

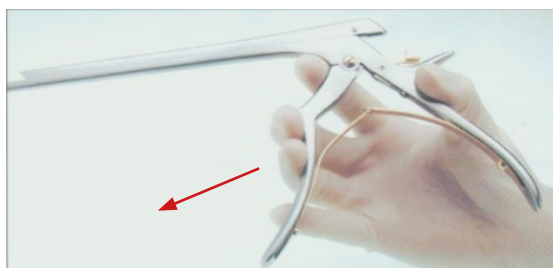


3. Nun den Griff wieder öffnen.

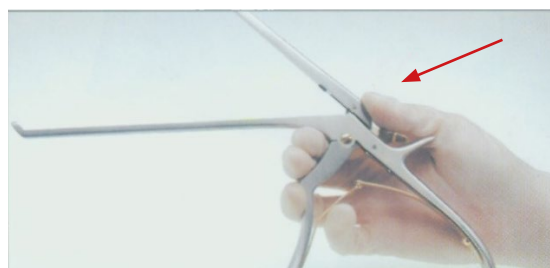


4. Und hinten auf den Schaft drücken. Fertig!


## MONATGE

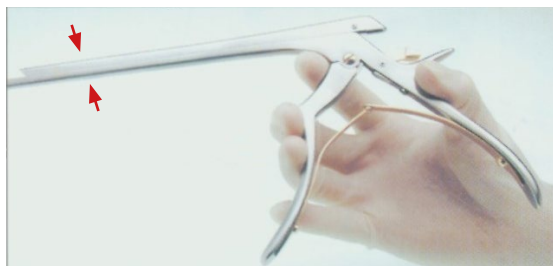


1. Zuerst Schaftteile ineinandersetzen.

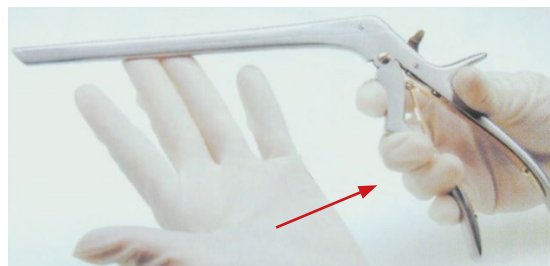

2. Dann den Griff schließen.

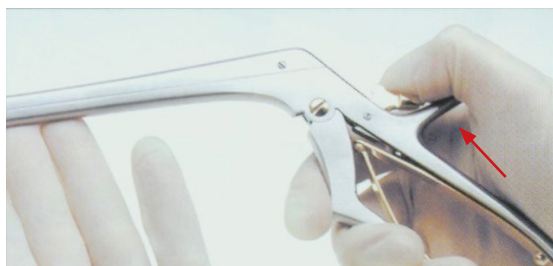

3. Nun den Riegel nach oben drücken.

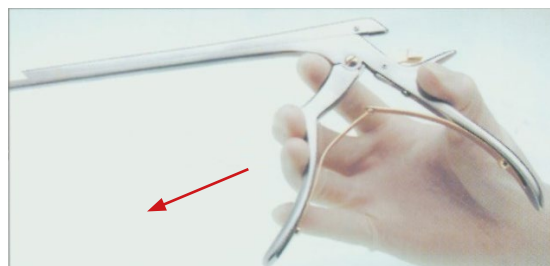

4. Und den Griff wieder öffnen. Fertig!

 Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise zur Pflege, Wartung und Reinigung!  
Gebrauchsanweisung: „Wiederverwendbare chirurgische Instrumente“

**DIE AS MEDIZINTECHNIK GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG, WENN NACHWEISLICH GEGEN DIESE KUNDEN-  
INFORMATION VERSTOSSEN WURDE.**