

# Gebrauchsanweisung

Stirnlampe nach CLAR



AS Medizintechnik GmbH • Sattlerstrasse 15, 78532 Tuttlingen, Germany • Tel 07461/966326 • Fax 07461/9663288

## Stirnlampe nach CLAR: Art. Nr. 10-042-02

### Allgemeine Informationen/ Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung ist vor Inbetriebnahme genau durchzulesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Nichteinhaltung oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung entbindet den Hersteller von seiner Haftung. Überprüfen Sie jedes Instrument vor jedem Gebrauch auf Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit. AS Medizintechnik GmbH warnt ausdrücklich davor, das Instrument zu verändern. Jede Änderung führt zum Ausschluss der Haftung. Das CE-Zeichen erlischt mit dem Einsatz von nicht zugelassenen Ersatzteilen.

Das Produkt darf nur von medizinisch ausgebildetem Personal verwendet werden!

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Unterstützende Ausleuchtung von Körperöffnungen (z.B. Mund, Nase, Ohren) durch medizinisch geschultes Personal

### Warnhinweise

Keine schadhafte Geräte und nur das vom Hersteller angegebene Zubehör verwenden!

Stirnleuchte und Zubehör keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, vor Hitze und Nässe schützen und ausschließlich im Innenbereich anwenden!

### Stecken Sie niemals die Stecker direkt in eine Steckdose des Stromnetzes (110V/220V/240V)!

Transformatoren nicht abdecken! Die Netzsteckdose sollte leicht zugänglich sein! Bei Betriebsfehler den Stecker sofort aus der Steckdose ziehen! Netzgerät niemals öffnen! Das Netzgerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Betäubungsgasen verwendet werden! Das Netzgerät nur zur Spannungsversorgung der Stirnleuchte verwenden! Die Lampe kann bei Gebrauch sehr heiß werden. Vor einem Lampenwechsel abkühlen lassen! Schützen Sie Patienten und Personal vor versehentlichem Berührung!

### Achtung:

Anwender und Patient können geblendet werden!

Für Reparaturen und bei Beschädigungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Hersteller!

### Handhabung/ Anwendung

Die Größe des Stirnbands kann nach Lösen der seitlichen schwarzen Mutter individuell eingestellt werden. Der Spiegel kann mit Hilfe des Kugelgelenkes und der Höhenverstellung genau angepasst werden. Schützen Sie die Stirnleuchte und das Zubehör vor mechanischer und thermischer Beschädigung! Nicht werfen! Keinerlei Gewalt anwenden! Zur Fokussierung des Lichtfleckes ist an den seitlichen Rändelschrauben zu drehen.

### Anschluss an eine Spannungsquelle

Bitte stellen Sie sicher, dass der Transformator die zulässige Spannung und den notwendigen Strom (min 1000 mA) liefern kann und stellen Sie die Spannung am Transformator ein. Die zulässige Spannung (4V/6V/10V) entnehmen Sie bitte den Endziffern der Artikelnummer bzw. dem Aufdruck auf der Verpackung.

Der Anschluss erfolgt über die Bananenstecker an einen Transformator (unsere Art-Nr. 10-042-09) oder über den Cinch-Stecker an eine Batteriebox.

### Lampenwechsel / Spiegelwechsel

Bei defekter Glühlampe wird diese vorsichtig (ohne den Glaskörper zu beschädigen) nach links heraus gedreht und anschließend durch eine **Ersatzlampe gleichen Typs** ersetzt.

Zum Wechseln des Spiegels lösen Sie die zentrale Schraube hinter dem Spiegel und tauschen den Spiegel aus.

Für die störungsfreie Funktion sind ausschließlich Ersatzteile aus unserem Produktprogramm zugelassen. Fremdfabrikate können zu Schäden am Gerät führen.

### Pflegehinweise

Oberflächenverschmutzungen am Gebrauchsort mit Einmaltuch/Papiertuch entfernen! Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen. Keine automatische Reinigung möglich!

Keine Sprüh- oder Tauchdesinfektion anwenden!

# Gebrauchsanweisung

Stirnlampe nach CLAR



AS Medizintechnik GmbH • Sattlerstrasse 15, 78532 Tuttlingen, Germany • Tel 07461/966326 • Fax 07461/9663288

## Entsorgung

Am Ende der Nutzungsdauer sind diese Geräte nach den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Für die Europäische Union gilt:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Bereiten Sie dieses Produkt und sein Zubehör zur Wiederverwertung oder zur getrennten Sammlung entsprechend der Richtlinie vor. Die Richtlinie gilt nicht für kontaminierte Produkte.

Verbrauchte Batterien sind gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen!

## Technische Daten

Gesamtgewicht:	220 g
Spiegel-Ø:	55 mm
Stirnleuchte:	Kabellänge 1,6 m, Stecker: Cinch
Verlängerung:	Kabellänge 1,6 m, Bananenstecker ø4 mm
Lichtaustritt:	fokussierbar
Umgebung:	Betrieb: 15 bis 30 °C Lagerung: -25 bis 50 °C Luftfeuchte: 30 bis 75 %
Klassifikation:	Klasse I, Regel 12 gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG
Entspricht:	EN60601-1

## Ersatzteile, Zubehör

- 10-042-06 Lampe 6 V, 1000 mA
- 10-042-98 Ersatzspiegel, mit Fassung

**DIE AS MEDIZINTECHNIK GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG, WENN NACHWEISLICH GEGEN DIESE KUNDEN-INFORMATION VERSTOSSEN WURDE.**