

Instrucciones de uso

Mano de plomo para niños y adultos



REF 47-212-00 / 47-214-00



AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone: +49 74 61 9663026
info@AS-Medizintechnik.de



Índice	Página
1. Indicaciones generales	2
2. Finalidad / Indicación	2
3. Contraindicaciones	2
4. Indicaciones de seguridad	2
5. Obligación de notificar incidentes con productos AS	2
6. Limpieza y desinfección	2
7. Vida útil	2
8. Descargo de responsabilidad	3
9. Explicación de los símbolos	3

1. Indicaciones generales

Con la compra de esta mano de plomo, usted ha adquirido un producto de calidad superior, y a continuación se detalla información sobre su correcta manipulación y uso. Le rogamos que lea y observe atentamente estas instrucciones de uso para minimizar en la medida de lo posible los riesgos tanto para los pacientes como para los usuarios. El uso, la desinfección y la limpieza sólo deben confiarse a personal cualificado que haya recibido la formación adecuada.

Consulte nuestro catálogo de productos actual para obtener información detallada sobre tamaños/variantes y modelos disponibles.

2. Finalidad / Indicación

La mano principal se utiliza para mantener la mano en la posición necesaria para la intervención quirúrgica. Doblando las lengüetas de los dedos se fija la mano y los dedos en la posición operatoria. Además, el peso los inmoviliza.



Las manos de plomo no están destinadas al contacto directo con el sistema nervioso central ni a la corrección de defectos del corazón o del sistema circulatorio central.

3. Contraindicaciones

Las manos de plomo son utilizadas exclusivamente por personal médico cualificado y especialmente formado en la técnica operatoria. El médico tratante también es responsable de garantizar que el personal quirúrgico y su personal tengan los conocimientos adecuados en la manipulación del producto.



La selección de una mano guía adecuada corresponde al usuario experimentado.

No se conocen otras contraindicaciones específicas.

4. Indicaciones de seguridad

- La manipulación y el uso del producto requieren la observancia exacta de estas instrucciones de seguridad.
- El producto sólo está diseñado para los fines especificados en esta ficha técnica. Cualquier otro uso puede ocultar peligros no identificados y debe evitarse.
- La integridad material del producto debe someterse a una inspección visual periódica antes de cada uso (en busca de roturas o irregularidades en la superficie) para descartar posibles riesgos de lesiones.

5. Obligación de notificar incidentes con productos AS



Tenga en cuenta lo siguiente:

Las leyes de su país exigen que, en determinadas circunstancias, nos comunique todos los incidentes graves relacionados con el uso de nuestros productos directamente después de que se produzcan, a nosotros, como fabricante, y/o a nuestro distribuidor autorizado y a la autoridad pública responsable.

6. Limpieza y desinfección



Las manos de plomo **no** deben someterse a esterilización por vapor ni a una limpieza excesivamente caliente, ya que existe el riesgo de que el material se recueza como consecuencia de ello. En este caso es más adecuada la limpieza con una solución desinfectante alcohólica. En este contexto, los desinfectantes deben utilizarse de acuerdo con las respectivas instrucciones de uso. Tenga en cuenta que no pueden utilizarse concentrados.

Debe comprobarse la integridad del material del producto antes de cada uso. El producto debe sustituirse si se detectan daños en la superficie.

No son necesarias medidas especiales para su eliminación. Respete las leyes y normativas nacionales e internacionales aplicables durante la eliminación.

7. Vida útil

La vida útil de las manos de plomo sólo se ve afectada de forma insignificante por el número de ciclos de limpieza realizados si se llevan a cabo de acuerdo con los procedimientos aquí descritos. Depende en mayor medida de un manejo considerado y cuidadoso de las manos de plomo durante todas las fases de uso, limpieza (SÓLO desinfección), transporte y almacenamiento. El final de la vida útil se alcanza si durante la inspección visual prescrita se detectan indicios de desgaste o defectos que limiten la función del producto. En este caso, es imperativo marcar las manos de plomo, excluirlas de cualquier uso posterior y sustituirlas por productos funcionales.



La flexión consecutiva y frecuente de los „dedos“ puede provocar la fatiga prematura del material y acortar la vida útil del producto. Una manipulación inadecuada del producto de este tipo no constituye motivo de reclamación, ni se responderá de ella en términos de obligación de garantía.

8. Descargo de responsabilidad

AS Medizintechnik GmbH sólo suministra a sus clientes productos probados y sin defectos. Todos nuestros productos están diseñados y fabricados para cumplir los más altos estándares de calidad. Queda excluida cualquier responsabilidad por productos que hayan sido modificados con respecto al original, mal utilizados o incorrectamente acondicionados o empleados.

AS Medizintechnik GmbH no asume ninguna responsabilidad por los daños directos o indirectos causados por un uso inadecuado, manipulación, reprocesamiento, esterilización y/o mantenimiento incorrectos. El incumplimiento de las instrucciones de uso, la manipulación incorrecta o el uso inadecuado de los productos suministrados por AS Medizintechnik GmbH conllevarán la exclusión de todos los derechos de garantía. AS Medizintechnik GmbH no se hace responsable de los daños derivados de lo anterior.

9. Explicación de los símbolos

Símbolo	Explicación	Símbolo	Explicación	Símbolo	Explicación	Símbolo	Explicación
	Fabricante		Observar las instrucciones de uso		GS1 Germany		Marcado CE
	Fecha de fabricación		ATENCIÓN		Producto sanitario		Marcado CE con el número del organismo notificado
	Número de pedido		No estéril		Cantidad		
	Número de lote		Proteger de la luz solar		Identificación única del producto		
	Número de serie		Proteger de la humedad				

AS MEDIZINTECHNIK GMBH NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CUANDO SE HAN INFRINGIDO DE MANERA COMPROBADA CONTRA ESTAS INSTRUCCIONES DE USO.