

**Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:**

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:



Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:  
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU\\_100\\_DE\\_Masteraufbereitungsanleitung](#)  
[GU\\_300\\_DE\\_Chirurgische\\_Instrumente](#)

## Demontage


1. Schließen Sie den Griff.




2. Drücken Sie den geoldenen Riegel nach unten.

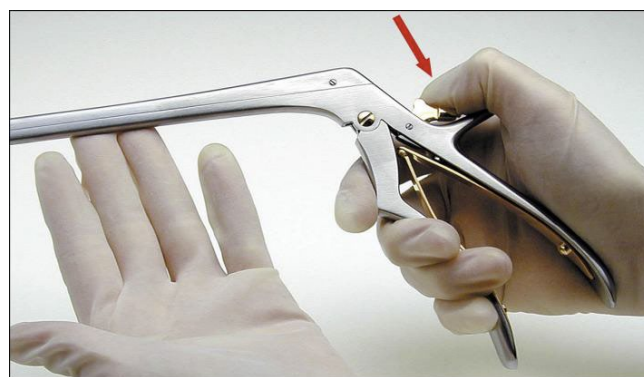

3. Öffnen Sie den Griff.

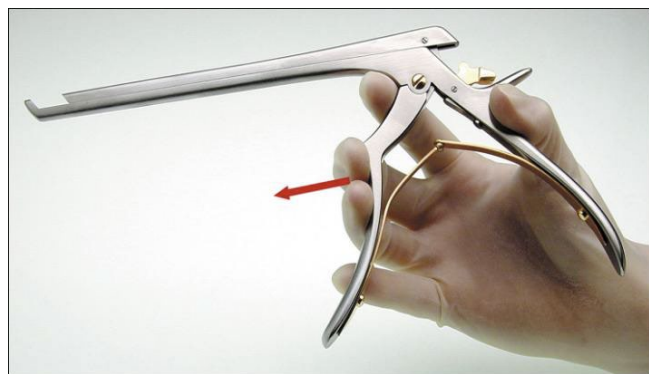

4. Drücken Sie hinten auf den Schaft um diesen nach oben hochzuklappen. Das Instrument ist nun komplett geöffnet.

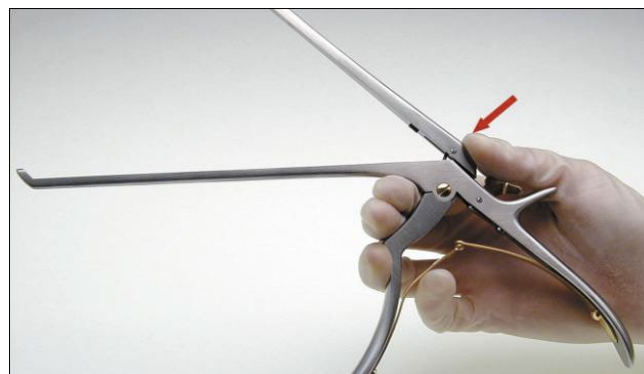

# Montage- / Demontageanleitung

Zerlegbare Kerrison Laminektomiestanzen

**REF** 40-014-01 Z - 40-016-26 ZE  
(Nur gültig für Artikel mit „Z“)



AS Medizintechnik GmbH  
Sattlerstraße 15  
78532 Tuttlingen / Germany  
Phone: +49 74 61 9 663026  
info@AS-Medizintechnik.de



**Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:**

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:



Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:  
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU\\_100\\_DE\\_Masteraufbereitungsanleitung](#)  
[GU\\_300\\_DE\\_Chirurgische\\_Instrumente](#)

## Montage

1. Drücken Sie die Schaftteile ineinander.



2. Schließen Sie den Griff.

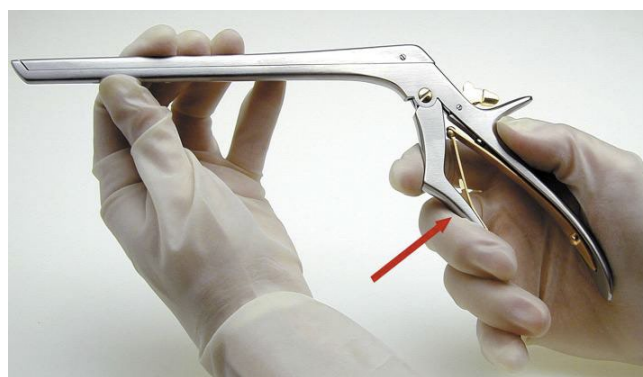

3. Drücken Sie den goldenen Riegel nach oben.



4. Öffnen Sie den Griff. Das Instrument ist nun komplett montiert.

