

# Montage- / Demontageanleitung

Zerlegbare Laminektomiezangen mit Pistolengriff

**REF** 40-028-32 Z - 40-059-23 Z  
(Nur gültig für Artikel mit „Z“)



AS Medizintechnik GmbH  
Sattlerstraße 15  
78532 Tuttlingen / Germany  
Phone: +49 74 61 9 663026  
info@AS-Medizintechnik.de



**Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:**

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:




Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:  
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU\\_100\\_DE\\_Masteraufbereitungsanleitung](#)  
[GU\\_300\\_DE\\_Chirurgische\\_Instrumente](#)

## Demontage


1. Drücken Sie Knopf „A“ um den Mechanismus zu lösen.

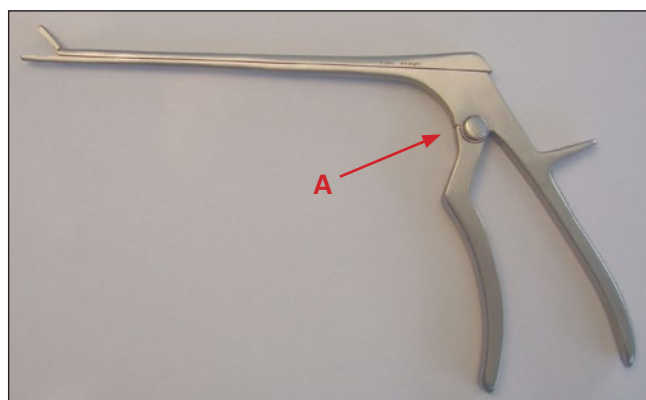

2. Ziehen Sie den Griff nach unten.

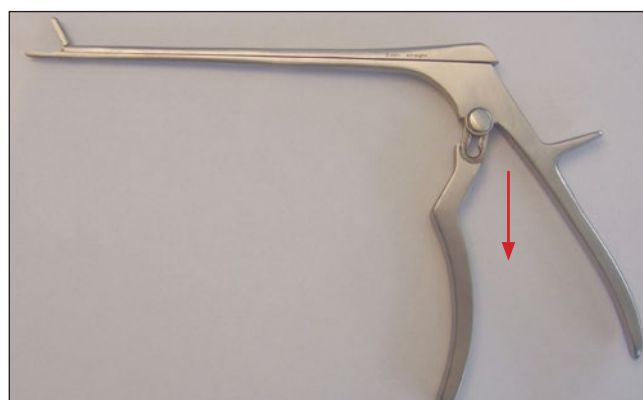

3. Klappen Sie den Schaft nach oben. Das Instrument ist nun komplett geöffnet.

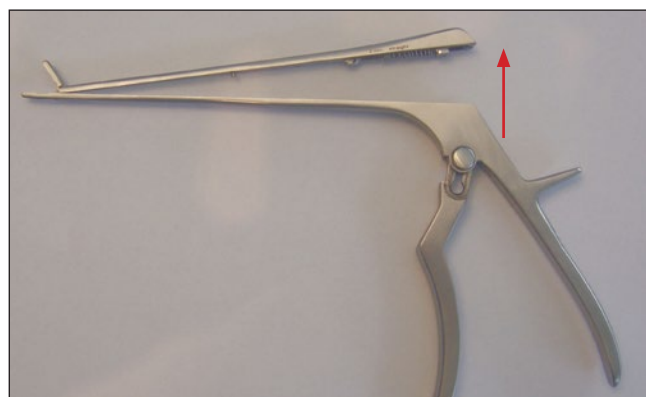

### ACHTUNG:

**Schaft nicht überdehnen  
bzw. nicht zu weit nach  
oben klappen! (Bruchgefahr)**

# Montage- / Demontageanleitung

Zerlegbare Laminektomiezangen mit Pistolengriff

**REF** 40-028-32 Z - 40-059-23 Z  
(Nur gültig für Artikel mit „Z“)



AS Medizintechnik GmbH  
Sattlerstraße 15  
78532 Tuttlingen / Germany  
Phone: +49 74 61 9 663026  
info@AS-Medizintechnik.de



**Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:**

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:



Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:  
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU 100 Maske](#) [Anwendungshinweise](#) [Anleitung](#)  
[GU 300](#) [Für verschiedene Instrumente](#)

## Montage

1. Klappen Sie den Schaft nach unten und schieben Sie die Schaftteile ineinander



2. Schieben Sie den Griff in mittlerer Position nach oben.

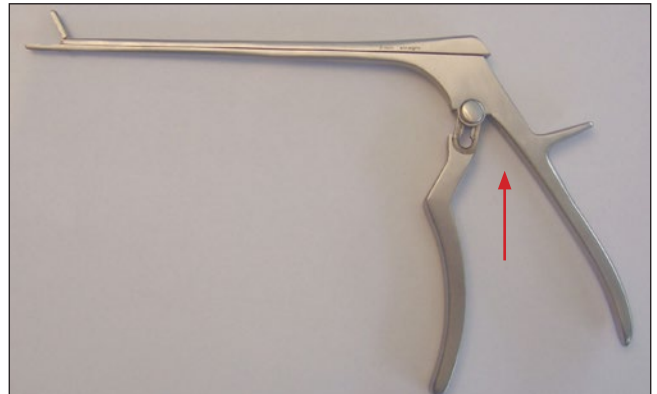

3. Betätigen Sie den Griff bis der Knopf „A“ eingerastet ist. Das Instrument ist nun komplett montiert.

