

Montage- / Demontageanleitung

Zerlegbare Laminektomiezangen mit Ringgriff

REF 40-050-02 ZR - 40-069-14 ZRB
(Nur gültig für Artikel mit „ZR“)



AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone: +49 74 61 9 663026
info@AS-Medizintechnik.de



Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:




Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU_100_DE_Masteraufbereitungsanleitung](#)
[GU_300_DE_Chirurgische_Instrumente](#)

Demontage


1. Schieben Sie den Riegel „A“ nach links oder rechts zur Seite.

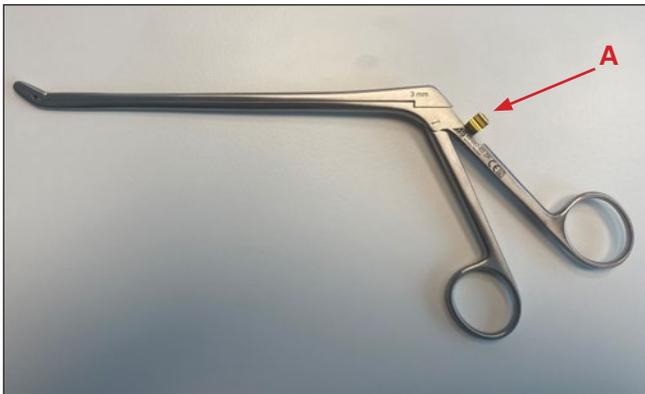

2. Schieben Sie den Griff nach vorne.

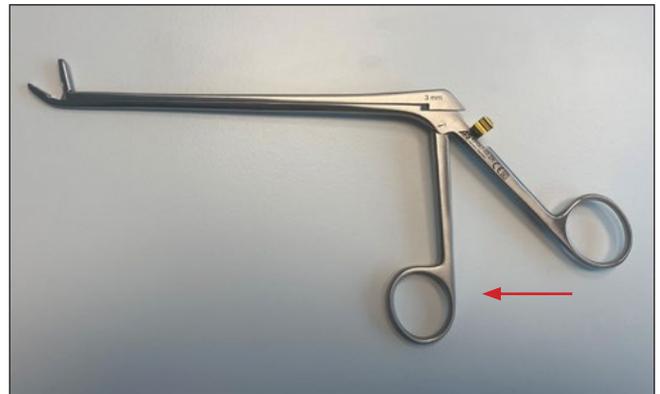

3. Klappen Sie den Schaft nach oben. Das Instrument ist nun komplett geöffnet.

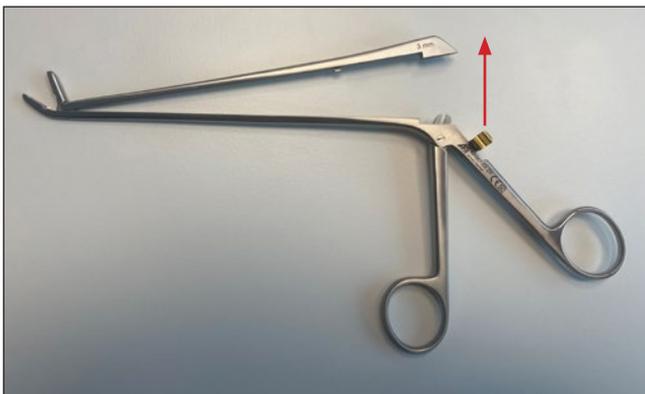

ACHTUNG:

**Schaft nicht überdehnen
bzw. nicht zu weit nach
oben klappen! (Bruchgefahr)**

Montage- / Demontageanleitung

Zerlegbare Laminektomiezangen mit Ringgriff

REF 40-050-02 ZR - 40-069-14 ZRB
(Nur gültig für Artikel mit „ZR“)



AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone: +49 74 61 9 663026
info@AS-Medizintechnik.de



Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:




Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU_100_DE_Masteraufbereitungsanleitung](#)
[GU_300_DE_Chirurgische_Instrumente](#)

Montage

1. Klappen Sie den Schaft nach unten in die Führung.

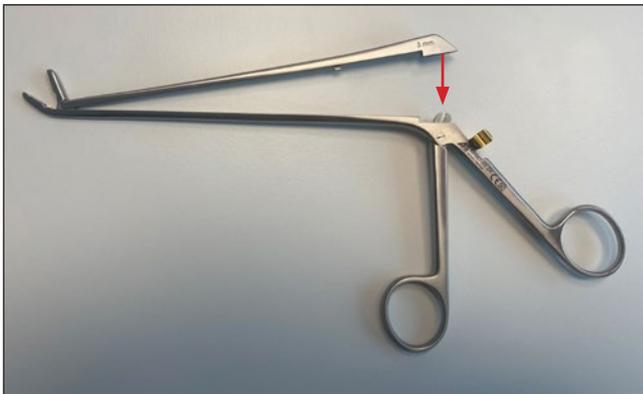

2. Schieben Sie den Griff zurück (Griff schließen).

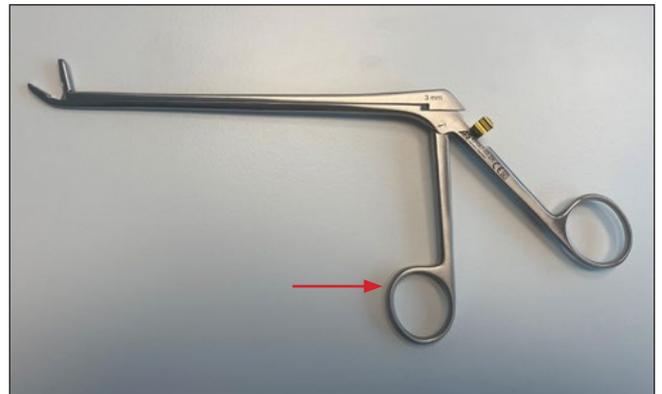

3. Schieben Sie den Riegel „A“ nach oben.



4. Der Riegel rastet ein und fixiert den Schaft. Das Instrument ist nun komplett montiert.

