

# Montage- / Demontageanleitung

Laminektomiesperrer mit Zahnstange

**REF** 20-302-00 - 20-305-00  
20-350-00 - 20-370-33 T



AS Medizintechnik GmbH  
Sattlerstraße 15  
78532 Tuttlingen / Germany  
Phone: +49 74 61 9 663026  
info@AS-Medizintechnik.de



**Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:**

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:



Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:  
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU\\_100\\_DE\\_Masteraufbereitungsanleitung](#)  
[GU\\_300\\_DE\\_Chirurgische\\_Instrumente](#)

## Demontage

1. Demontieren Sie ggf. gesteckte Ventile / Blätter vom Sperrer.  
(Diese müssen separat aufbereitet werden)



2. Drehen Sie den rechten Arm, über die Zahnstange, bis dieser am Ende herausgenommen werden kann.

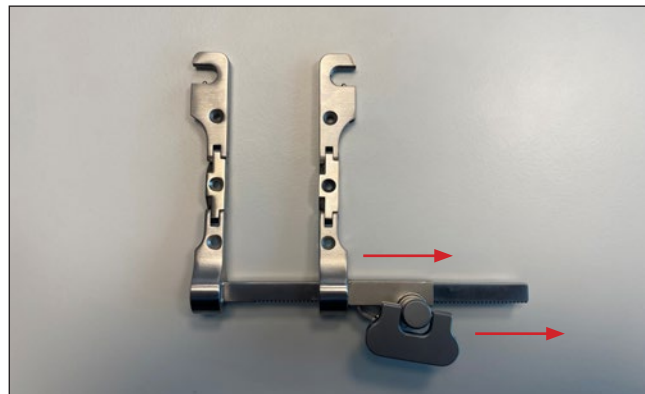

3. Entnehmen Sie die Drehhebel „A“. Der Sperrer ist komplett zerlegt. (Bei bestimmten Sperrern kann der Drehhebel nicht demontiert werden!)



# Montage- / Demontageanleitung

Laminektomiesperrer mit Zahnstange

**REF** 20-302-00 - 20-305-00  
20-350-00 - 20-370-33 T



AS Medizintechnik GmbH  
Sattlerstraße 15  
78532 Tuttlingen / Germany  
Phone: +49 74 61 9 663026  
info@AS-Medizintechnik.de



**Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:**

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:



Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:  
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU\\_100\\_DE\\_Masteraufbereitungsanleitung](#)  
[GU\\_300\\_DE\\_Chirurgische\\_Instrumente](#)

## Montage

1. Stecken Sie den Drehhebel „A“ (wenn nicht fest verbunden) in die dafür vorgesehene Öffnung.



2. Stecken Sie den rechten Arm mit dem Drehhebel auf die Zahnstange auf und drehen diese nach links ein.

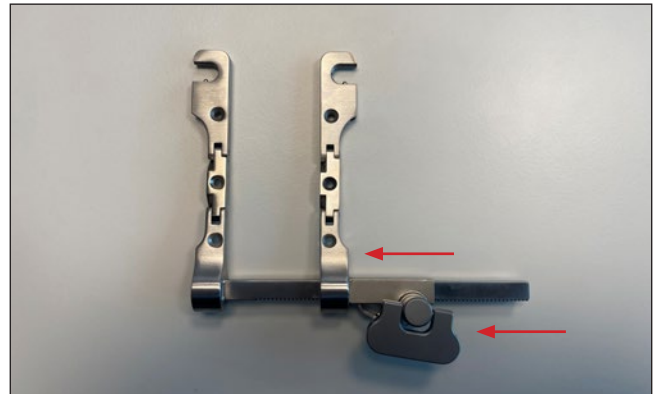

3. Der Sperrer ist komplett montiert.

