

Montage- / Demontageanleitung

Mikro Ohrzängchen, zerlegbar

REF 27-209-14 - 27-234-15
27-400-01 - 27-428-01



AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone: +49 74 61 9 663026
info@AS-Medizintechnik.de



Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:




Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU_100_DE_Masteraufbereitungsanleitung](#)
[GU_300_DE_Chirurgische_Instrumente](#)

Demontage


1. Schließen Sie den Griff.

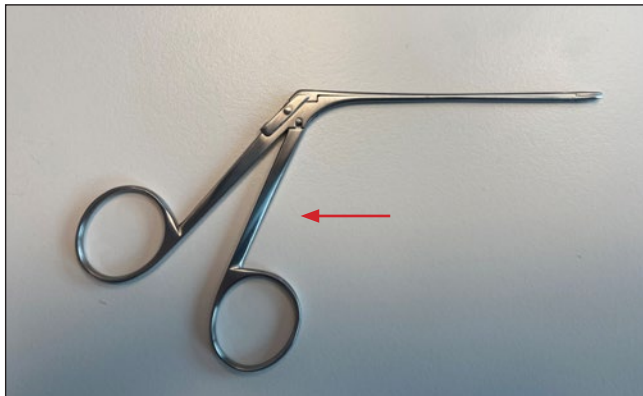


2. Schieben Sie den Riegel nach oben

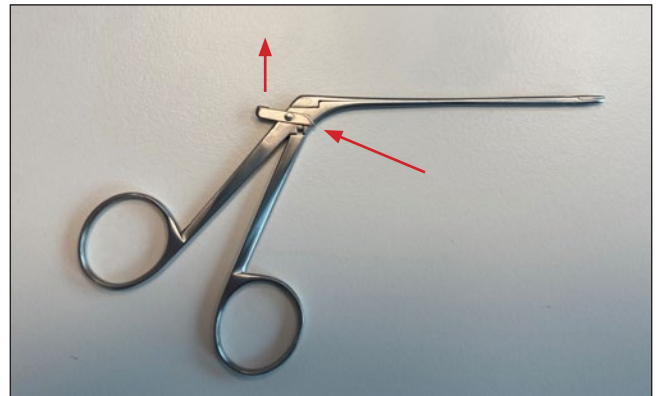

3. Drehen Sie das Instrument um und drücken Sie den oberen Schaft vorsichtig zur Seite weg.

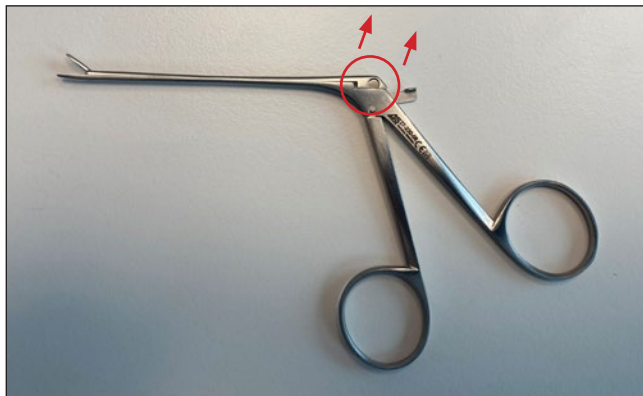

4. Klappen Sie den Schaft vorsichtig nach oben. ACHTUNG: Die Führung in der Mitte nicht überdehnen.

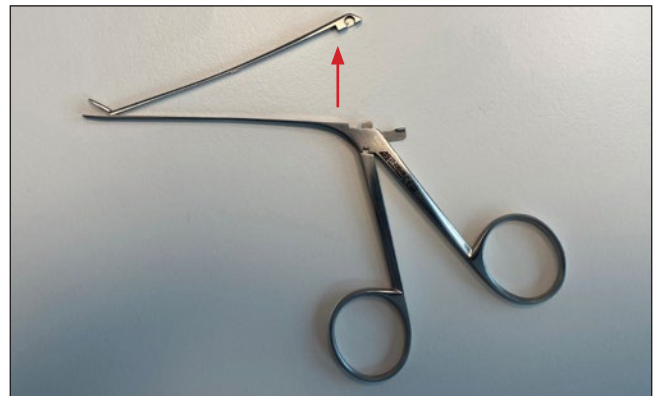

5. Ziehen Sie das Griffteil nach unten weg. Das Instrument ist komplett zerlegt.



ACHTUNG:

Schaft nicht überdehnen bzw. nicht zu weit nach oben klappen! (Bruchgefahr)

ACHTUNG:

Einzelteile! Stellen Sie sicher, dass alle Teile wieder mit den gleichen Komponenten montiert werden.

Montage- / Demontageanleitung

Mikro Ohrzängchen, zerlegbar

REF 27-209-14 - 27-234-15
27-400-01 - 27-428-01



AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone: +49 74 61 9 663026
info@AS-Medizintechnik.de



Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:




Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU_100_DE_Masteraufbereitungsanleitung](#)
[GU_300_DE_Chirurgische_Instrumente](#)

Montage


1. Schieben Sie das Griffteil von unten in die Führung.

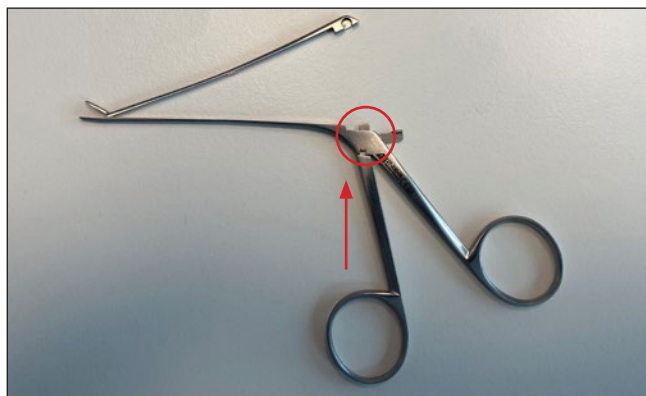

2. Klappen Sie den Schaft nach unten und hebeln dieses vorsichtig in die runde Führung des unteren Griffteils ein.

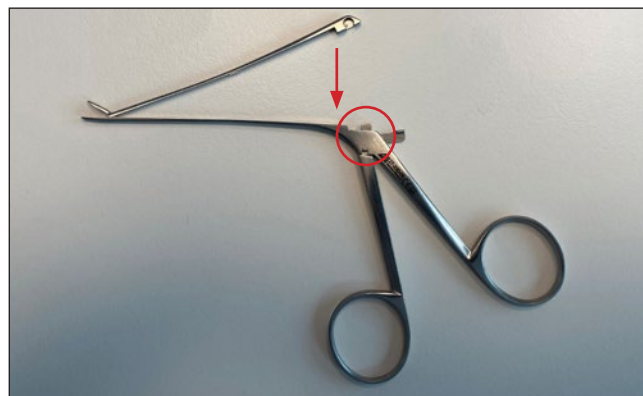

3. Achten Sie darauf, dass der Schaft bereits in dieser Einstellung sauber auf dem unteren Teil läuft.

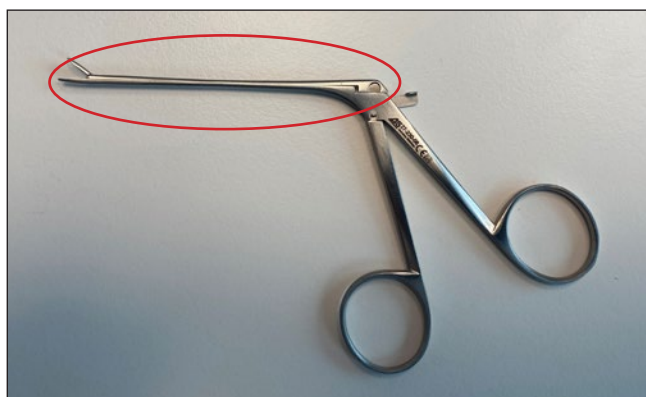

4. Drehen Sie das Instrument um und schieben den Riegel nach unten. Das Instrument ist nun komplett montiert.

