

Montage- / Demontageanleitung

Zangen mit Schiebenschaft und Pfauenauge, zerlegbar



AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone: +49 74 61 9663026
info@AS-Medizintechnik.de



REF 26-411-30 - 26-420-50 / 27-460-25 - 27-461-48 / 27-600-10 - 27-600-12 / 27-650-01 - 27-650-14 / 33-362-28 - 33-362-42 / 35-410-28 - 35-421-23 / 36-080-19 - 36-082-12 / 40-036-30 A - 40-038-36 A (Nur gültig für Artikel mit „A“) / 40-038-00 - 40-038-13 / 40-040-05 - 40-043-01 / 40-072-07 - 40-076-35 / 40-090-14

Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:




Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU_100_Masteraufbereitungsanleitung](#)
[GU_300_Chirurgische Instrumente](#)

Demontage


1. Schieben Sie das Griffteil nach vorne in die mittlere Position.

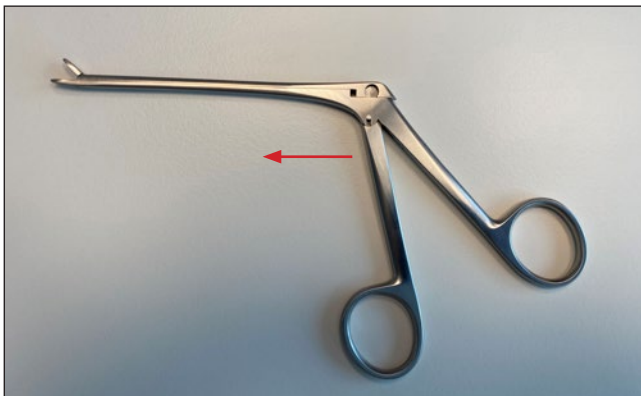

2. Hebeln Sie den Schaft an der runden Öffnung nach hinten und klappen Sie den Schaft vorsichtig nach oben. ACHTUNG: Die Führung in der Mitte nicht überdehnen.

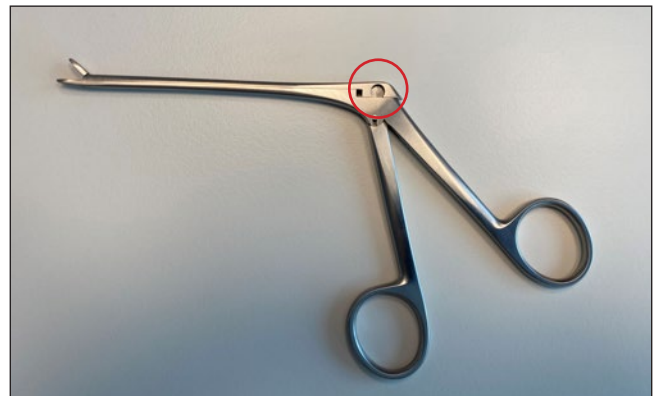

3. Der Schaft ist nach oben geklappt und das Instrument ist komplett zerlegt.

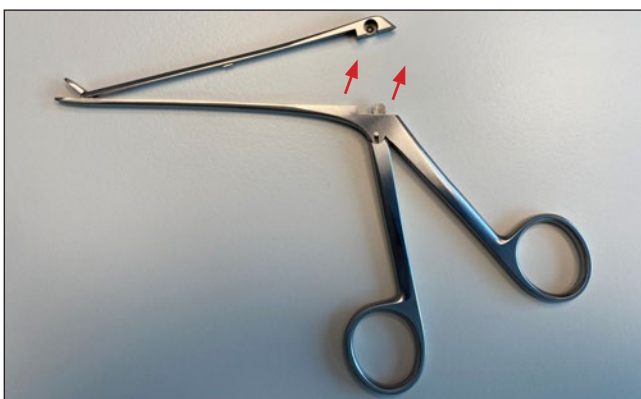

ACHTUNG:

**Schaft nicht überdehnen
bzw. nicht zu weit nach
oben klappen! (Bruchgefahr)**

Montage- / Demontageanleitung

Zangen mit Schiebenschaft und Pfauenauge, zerlegbar



REF 26-411-30 - 26-420-50 / 27-460-25 - 27-461-48 / 27-600-10 - 27-600-12 / 27-650-01 - 27-650-14 / 33-362-28 - 33-362-42 / 35-410-28 - 35-421-23 / 36-080-19 - 36-082-12 / 40-036-30 A - 40-038-36 A (Nur gültig für Artikel mit „A“) / 40-038-00 - 40-038-13 / 40-040-05 - 40-043-01 / 40-072-07 - 40-076-35 / 40-090-14

Zur Vorbereitung für die Dekontamination müssen die o.g. Produkte geöffnet ggf. in ihre Einzelteile zerlegt werden, so dass alle Oberflächen dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Die Instrumente müssen wie beschrieben zerlegt und nach der Reinigung wieder montiert werden:

Weitere Informationen zur Aufbereitung und Handhabung finden Sie in den folgenden Dokumenten:




Reinigung, Desinfektion und Sterilisation:
Gebrauchs- und Handhabungshinweise:


[AU_100_Masteraufbereitungsanleitung](#)
[GU_300_Chirurgische Instrumente](#)

Montage

1. Schieben Sie das Griffteil nach vorne in die mittlere Position.

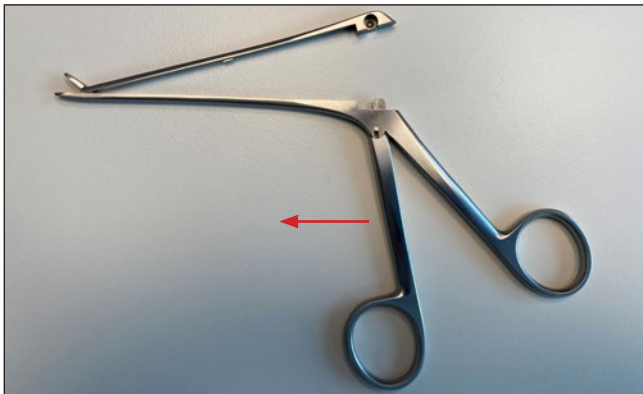

2. Klappen Sie den Schaft nach unten und hebeln dieses vorsichtig in die runde Führung des unteren Griffteils ein.

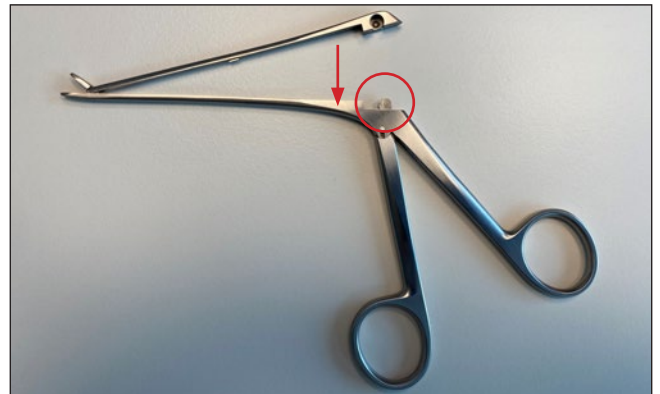

3. Das Instrument ist nun komplett montiert.

